

Keramik-Gewebetrimmer

Zur Zahnfleischbehandlung. Als Alternative zu Skalpell und Elektrochirurgie.

Der Keramik - Gewebetrimmer schneidet bei Gewebekontakt des rotierenden Instrumentes durch Umwandlung seiner kinetischen Energie in Wärme. Diese Wärme wird ausschließlich innerhalb des umgebenden Bindegewebes wirksam und führt gleichzeitig zu einer Hämostase (Blutstillung)

GW 249/ GW 249L <i>max. 500.000 UpM</i>		
Artikel Nr.:	GW 249	GW 249L
Durchmesser:	016	016
Länge/Stärke (mm):	5	8
Schaft:	FG	FG

Der Keramik - Gewebeschnneider kann das Elektrotom ersetzen bei:

- Gingivektomie
- Gingivamodellierung
- Freilegung der Präparationsgrenzen
- Implantat Freilegung
- Sulkuseröffnung
- Freilegung von verlagerten Zähnen

Die Keramikspitze wird nicht heiß.

Anwendung:

Immer ohne Kühl-Wasser-Spray

Sterilisation:

Autoclav bis 135° C