

Diamantpolierer - Multi-Flex KOMPO

Komposite | Hybridkomposite mit hohem Glas- Keramikanteil

Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite, Kompo- mere und Inomere.

Die neuartige Form mit flexiblen Polierlamellen bietet dem Zahnarzt verschiedene Anwendungs- vorteile für eine noch einfachere Politur aller Kompositorestorationen, insbesondere hochgefüllter Hybrid-Komposite.

Hauptmerkmal des neuen Poliersystems ist die Flexibilität. Die Polierlamellen passen sich jeder Oberflächenstruktur an, wodurch eine gleichmäßige Politur aller Oberflächen gewährleistet wird. Ein weiterer Vorteil liegt in der Erhaltung der ursprünglichen Oberflächenstruktur der Restauration. Nach der Modellation der Kompositeoberfläche mit Metallinstrumenten wird diese bei der Politur nicht mehr verändert. Außerdem sorgt die spezielle Form für eine Reduzierung der Reibungs- wärme.

Sterilisierbar bei 134° | Anwendung ohne Polierpaste

Multi-Flex Abtrag / Glätten P 170D				Multi-Flex Hochglanz P 172D			
							
Artikel Nr.:	P 170D	P 170D	P 171D	Artikel Nr.:	P 172D	P 172D	P 173D
Durchmesser:	110	140	140	Durchmesser:	110	140	140
Stärke/Länge(mm):	1,6	1,6	1	Stärke/Länge(mm):	1,6	1,6	1
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	W	W	W	Schaft:	W	W	W

Die Formen P 158 und P 159 wurden speziell für die Okklusal- und Flächenpolitur ent- wickelt. Durch die gedrehte Bürstenform können auch tiefe Fissuren erreicht werden.

Multi-Flex Abtrag / Glätten P 158D		Multi-Flex Hochglanz P 159D		
Artikel Nr.:	P 158D	Artikel Nr.:	P 159D	
Durchmesser:	055	Durchmesser:	055	
Stärke/Länge(mm):	5	Stärke/Länge(mm):	5	
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	
Schaft:	W	Schaft:	W	
				SET Artikel Nr.: Compo Polierset PLUS

Diamantpolierer

Komposite | Hybridkomposite mit hohem Glas- Keramikanteil

TIPP

Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite, Kompo-
mere und Inomere.
Speziell für harte, hochgefüllte Hybridkomposite (mit hohem Glas- bzw. Keramikanteil).

Abtrag / Glätten P 160 - P 163						
Artikel Nr.:	P 160D	P 160D	P 160D	P 161D	P 163D	P 162D
Durchmesser:	030	030	050	060	050	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	10	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Hochglanz P 164 - 168						
Artikel Nr.:	P 164D	P 164D	P 164D	P 165D	P 167D	P 168D
Durchmesser:	030	030	050	060	050	100
Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	10	2,5
UpM opt. (x 1.000):	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'	3' - 8'
Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Diamantpolierer
Komposite

3-Stufiges, leistungsstarkes, mit Diamantkörnung durchsetztes Poliersystem für brillante Ergebnisse in Sekundenschnelle. Korrekturen erledigen Sie vor allem auf klassischen Kompositmaterialien mit minimalem Aufwand.

Abtrag P 131 - P 133					
	Artikel Nr.:	P 131D	P 131D	P 132D	P 133D
	Durchmesser:	030	040	060	100
	Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	2,5
	UpM opt. (x 1.000):	3'-8'	3'-8'	3'-8'	3'-8'
	Schaft:	FG	W	W	W

Glätten P 125 - P 127					
	Artikel Nr.:	P 125D	P 125D	P 126D	P 127D
	Durchmesser:	030	040	060	100
	Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	2,5
	UpM opt. (x 1.000):	3'-8'	3'-8'	3'-8'	3'-8'
	Schaft:	FG	W	W	W

Hochglanz P 128 - P 130					
	Artikel Nr.:	P 128D	P 128D	P 129D	P 130D
	Durchmesser:	030	040	060	100
	Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	2,5
	UpM opt. (x 1.000):	3'-8'	3'-8'	3'-8'	3'-8'
	Schaft:	FG	W	W	W

Diamantpolierer
Keramik | Metall

3-Stufiges, leistungsstarkes, mit Diamantkörnung durchsetztes Poliersystem für brillante Ergebnisse in Sekundenschnelle. Korrekturen erledigen Sie vor allem auf KERAMIK und METALLEN mit minimalem Aufwand.

Abtrag P 115 - P 117 Multi-Flex P 110							
	Artikel Nr.:	P 115D	P 115D	P 115D	P 116D	P 117D	P 110D
	Durchmesser:	030	030	040	060	100	140
	Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	2,5	1,6
	UpM opt. (x 1.000):	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
	Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Glätten P 118 - P 120 Multi-Flex P 111							
	Artikel Nr.:	P 118D	P 118D	P 118D	P 119D	P 120D	P 111D
	Durchmesser:	030	030	040	060	100	140
	Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	2,5	1,6
	UpM opt. (x 1.000):	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
	Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Hochglanz P 121 - P 123 Multi-Flex P 112							
	Artikel Nr.:	P 121D	P 121D	P 121D	P 122D	P 123D	P 112D
	Durchmesser:	030	030	040	060	100	140
	Länge/Stärke (mm):	6,5	7,5	10	7,5	2,5	1,6
	UpM opt. (x 1.000):	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'	7' - 12'
	Schaft:	FG	W	W	W	W	W

Diamantpolierer
Silikat- und Glaskeramiken

Die Entwicklungen im Bereich der dentalen Restaura-tionskeramiken bringen auch notwendige Veränderungen auf der Instrumentenseite mit sich. Speziell moderne Silikat- und Glaskeramiken wie IPS e.max, Empress o.ä. stellen durch ihren erhöhten Härtegrad eine große Herausforderung für bestehende Poliersysteme dar.

Diese Lücke schließt Rotodent mit einem neuen Diamantpoliersystem. Speziell auf die Anforderungen moderner Keramiken abgestimmt sind für eine Hochglanzpolitur nur noch zwei Polierstufen nötig. Neben der Zeitersparnis ist die Instrumentenstandzeit gegenüber bestehen-den Poliersystemen deutlich erhöht. Durch die Möglichkeit der interoralen Anwendung (Schaft 204 – Winkelstück) eignet sich das Poliersystem auch für Korrekturen an bereits eingesetzten Arbeiten.




Abtrag / Glätten P 190 - P 192				
Artikel Nr.:	P 190D	P 190D	P 191D	P 192D
Durchmesser:	030	040	060	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	W	W	W	W

Hochglanz P 195 - 197				
Artikel Nr.:	P 195D	P 195D	P 196D	P 197D
Durchmesser:	030	040	060	140
Länge/Stärke (mm):	6,5	10	7,5	1,6
UpM opt. (x 1.000):	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'	10' - 12'
Schaft:	W	W	W	W

Rotodent Schleif- und Polierset
GK-1 für Silikat- und Glaskeramiken
sowie Zirkon

Für größere Korrekturen an bereits eingesetzten Arbeiten empfiehlt Rotodent das 3-Stufen Polierset GK-1.

Ein abrasiver, diamantierter Stein und zwei Diamantpolierer im praktischen Set für Chairside Bearbeitung von Silikat- und Glaskeramiken oder Zirkon.

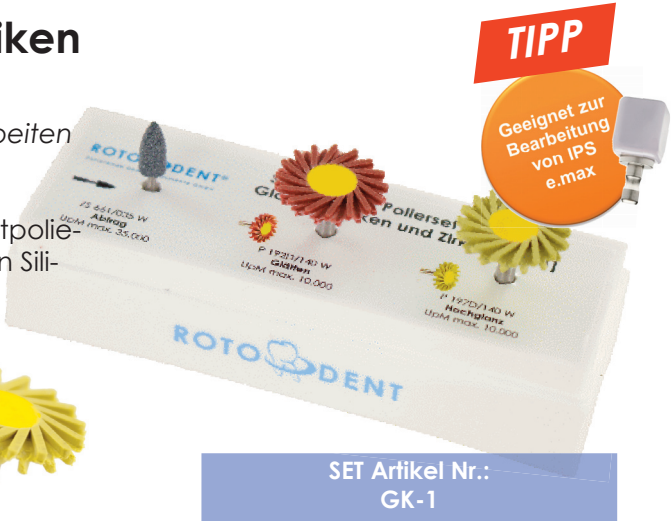

GK-1			
	Artikel Nr.:	ZS 661 (Abtrag)	P 192D (Glätten)
	Durchmesser:	035	140
	Länge (mm):	7,5	1,6
	UpM Opt. (x1.000) :	15' - 25'	10' - 12'
	Schaft:	204 W	204 W

SET Artikel Nr.:
GK-1

Einstufiges Diamant-Poliersystem für
perfekte Komposit-Oberflächen

Die komplette Politur in einem Schritt – schnell, präzise, brillant

Vorpolieren: Verstärkter Anpressdruck
Hochglanzpolieren: Reduzierter Anpressdruck

Vorpolitur & Hochglanz P 140 - P 142			
	Artikel Nr.:	P 140D	P 141D
	Durchmesser:	030	040
	Länge (mm):	7,5	10
	UpM max. (x1.000)	20'	20'
	Schaft:	204 W	204 W